


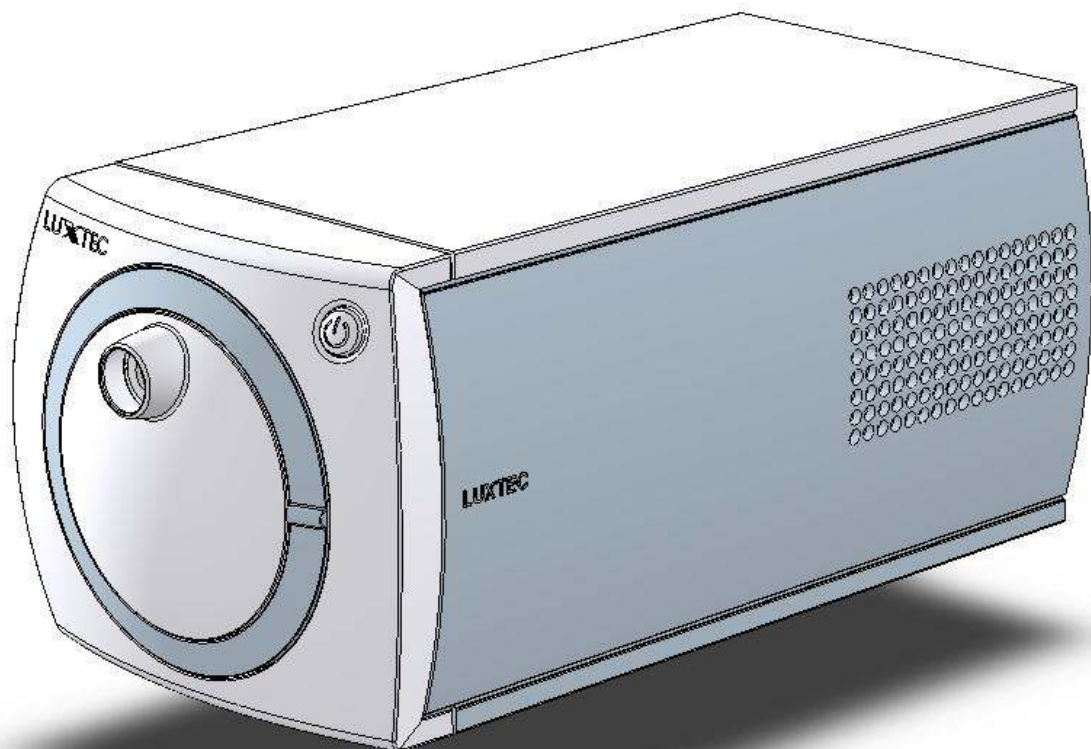

CLX 氙氣光源機

中文三級故障排除、維護與清潔手冊



故障排除

故障	原因	解决措施
无光输出	两个开关没有打开 设备没有通电 衰减器关闭 保险丝断开	打开主电源开关和开/待机开关 确保电源线是连在有效的医院级插座上 顺时针旋转衰减器 按照“维护”一节所示更换保险丝
无光输出并且设备发出滴答声	灯泡太旧或有故障 未装灯泡	更换/装灯（参见本手册的“氙气灯更换”一节）
光输出减弱	衰减器位置错误 灯泡老化或故障 前灯或光纤光导损坏	旋转衰减器 更换灯泡 检查或更换故障的元件
没有使用时，设备也发热	主电源开关是打开的（图 3）	在主电源开关打开和待机时，这是正常的。关掉开关
CLX 周围过热	可能是风扇故障	退回设备（参见本手册的“修理与退回”一节）

維護與清潔

維護：

當與接地插座上相連的光源機不能正常工作時，首先應斷開電源線然後再檢查保險絲（見下述）。如果使用時燈泡出現故障，請不要嘗試修理設備。首先關掉設備，讓它冷卻下來，時間至少 15 分鐘，然後再嘗試重新啓動設備。如果燈泡還是不能點亮，更換燈泡。如果仍有問題，請將設備送回至 Luxtec 或授權經銷商處進行檢查。

更保險絲：

光源機保險絲位於設備背部的電源入口模塊處。從設備上拆下電源線，使用小的平頭螺絲刀打開保險蓋，將紅色的塑膠保險絲座從電源入口模塊處拔下。檢查保險絲是否熔斷。如果有必要，使用同樣等級的保險絲進行更換（保險絲 3.15A，250VAC，5x20 mm，Slo-Blo，IEC 標準，Luxtec 配件號 601919）。更換保險絲後，將紅色塑膠保險絲座裝回至電源入口模塊，蓋上蓋子。將電源線插回光源機，重新測試設備。

清潔：

清潔前，設備至少需要冷卻 15 分鐘。

光源機外表面可用 70% 的異丙醇進行清潔和消毒。清潔前，拔下電源線。抹上異丙醇後等待 5 分鐘讓其揮發，然後再接上電源。

如有必要，使用真空吸塵器和軟刷除去風扇和通風口上積聚的可見灰塵。