


LUXTEC

CLX 氙氣光源機



中文二級更換手冊

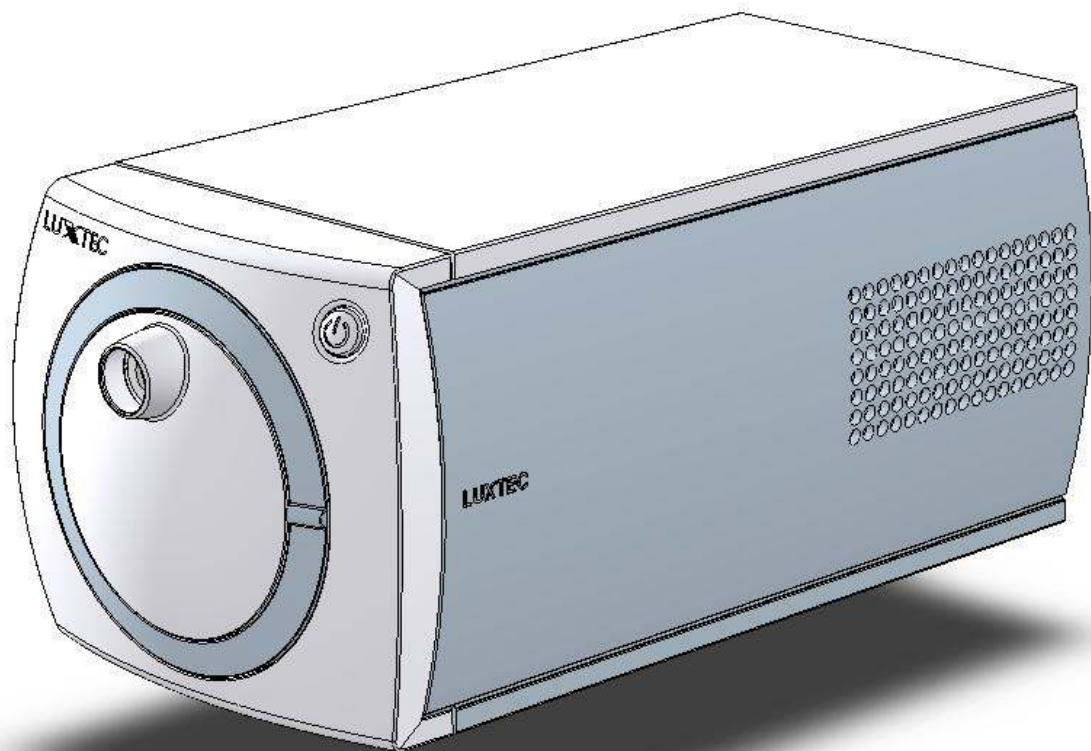

氙氣燈更換

警告：

操作氙氣燈前，需斷開光源機的主電源並讓設備冷卻。操作氙氣燈時，應使用能保護眼睛、面部和手部的裝置。請注意氙氣燈有可能會爆炸。如果操作正確，爆炸的機率非常低。但如果沒有採取正確的防護措施，當氙氣燈爆炸時，受傷的機率將非常高。光源機沒有工作時，氙氣燈出故障的機率將極小。每個氙氣燈在製造時都經過了嚴格的全面檢查，確保避免故障發生。

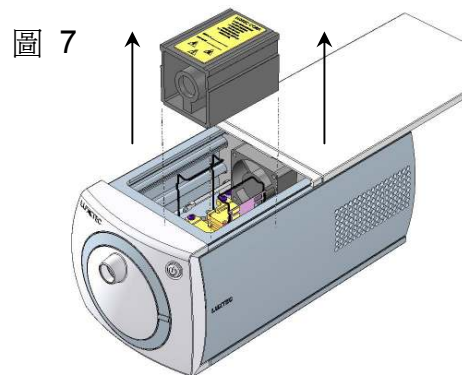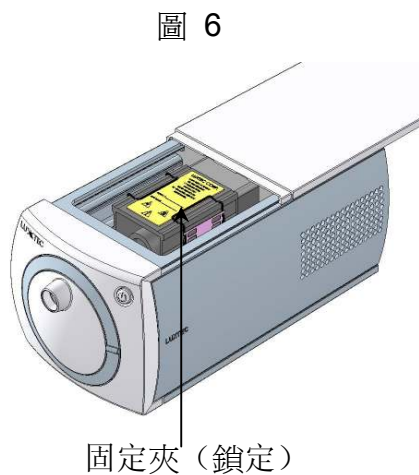

當照明不過理想或充分時，更換燈泡。

拆燈：

1. 確認主電源開關置於關閉位置。斷開電源線連接。
2. 更換燈泡前，至少等待 15 分鐘讓設備冷卻下來。如果在維修前沒有充分冷卻，設備可能會有爆炸危險。
3. 擰下 CLX 背部的固定螺釘。參見圖 3。
4. 將 CLX 頂蓋向設備背部滑動。不要將頂蓋完全地滑出，能夠拆下和更換燈泡就可以了。參見圖 6。
5. 打開 CLX 上燈泡的固定夾，抓住燈泡並豎直向上提起。參見圖 7。

氙氣燈更換

更換燈泡：

燈泡向前。參見圖 8。將燈泡放入 CLX 中，靠著風扇。參見圖 9。

燈插座必須與燈頭的插頭相配。將燈安入預留的裝燈位置。

注意：不要接觸燈玻璃窗。

2. 將燈各側的固定夾卡在燈的頂部。此時燈已處於鎖定位置。參見圖 6。
3. 將 CLX 頂蓋完全向前推。使用螺絲刀安裝固定螺釘（參見圖 3）。
4. 將電源線與 CLX 後部相連。將主電源開關置於“開”位置，然後按下 開/待機 開關，打開光源機。
5. 調節調節環，檢查設備是否發光。

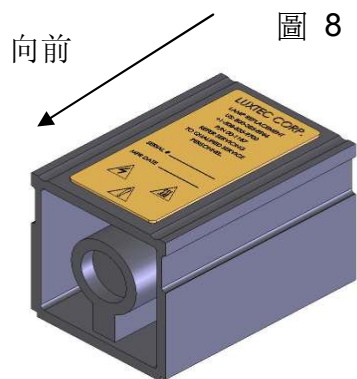


圖 8

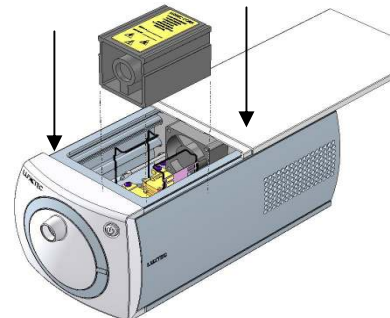



圖 9

燈泡處置：

對氙氣燈的處置沒有限制。但用戶應檢視並遵守任何適用的聯邦、州和/或當地的規定。

如要處置 Luxtec 氙氣燈，只需打開充氣片，放出裡面的殘餘氣體，然後以不影響環境的模式進行處理。Luxtec 燈完全由金屬、藍寶石和陶瓷製成。該燈不含有機（碳基）材料、汞、稀土元素、或任何影響處理的其它材料。填充的氙氣屬惰性氣體，無毒。

可調式落地架安裝

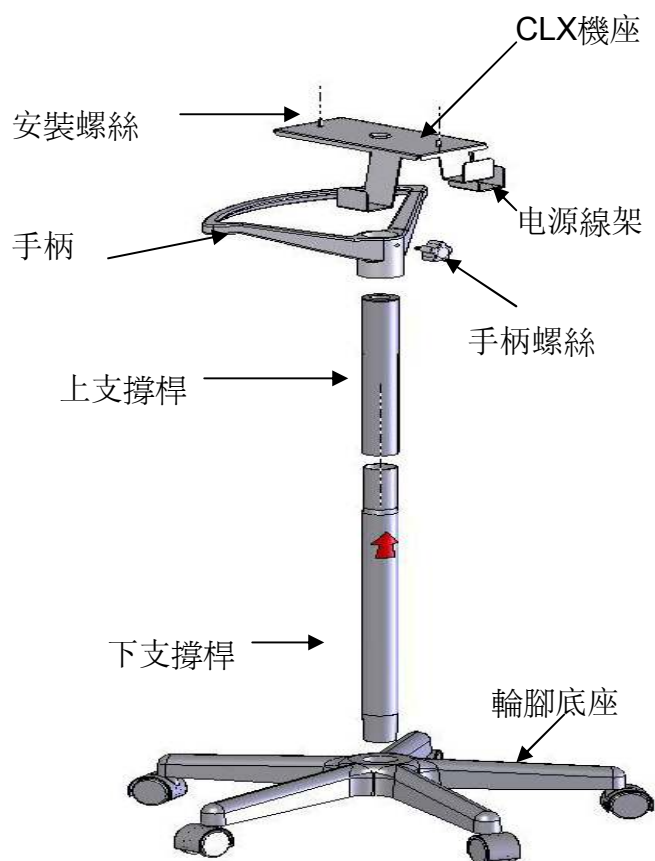

落地架組件共有四（4）個配件。
參見圖 8。

1. 輪腳底座
2. 兩段式支撐杆
3. 帶電源線掛架的光源機座
4. 手柄

落地架組裝說明：

1. 組裝支撐杆。注意下支撐杆上的箭頭必須朝上。滑動上支撐杆，使之在下支撐杆末端的箭頭之上，固定。
2. 將組裝好的支撐杆插入輪腳底座，固定。
3. 將頂部帶有手柄螺釘的手柄裝入上支撐杆。滑動手柄，使之與支撐杆頂部有 5 英寸（13 cm）的距離，擰緊手柄螺釘，固定位置。
4. 將 CLX 機座柱完全插入上支撐杆的塑膠襯套中。旋轉機座，直至襯套上的固定銷與機座柱底部的槽子咬合。
5. 松去手柄螺釘，調節手柄位置，使之對著電源線掛架。按照使用者偏好調整高度，然後擰緊手柄螺釘。
6. 將安裝螺釘對準 CLX 表面底部的螺釘孔，擰緊螺釘，把 CLX 固定在機座上。
參見圖 9。

圖 9

