

清潔維修

1. 檢查紅喜 201⁺ 血糖機為關閉狀態，顯示為空
2. 拉開試片匣於放置位置，小心壓下右正方之卡
3. 小心拉出試片匣
4. 以酒精清潔
5. 插入 Hemocue* 清潔棒，拉進/出 5-10 次，若清潔棒髒污，要更換新的，直到清潔乾淨
6. 15 分鐘後置回試片匣，可重新使用

※ 外殼可以酒精或中性肥皂水清潔

※ * 號為 Optional 物件



故障排除

* 若無法解除故障 請洽當地供應商

螢幕顯示	說明	解決方法
顯示故障碼	可能為偶發性故障	關閉儀器 30 秒後再重開
E00	限定的時間內,沒有穩定的的結果 1. 試片故障` 2. 機版故障	* 換新試片,檢查使用期限 * 聯絡原廠公司 1.a. 檢查試片期效 1.b. 換新試片,重新測量
E01-E05	發光裝置或電子裝置故障或髒污	* 關掉儀器清潔之 * 聯絡原廠公司
E06	不穩定的空白值,機器 可能太冷	* 關機使機器達到室溫 * 若無法解決,聯絡原廠公司
E07	電池電壓過低	更換電池或使用變壓器
E08	試片夾內阻塞	* 檢查是否依使用方法連接之 * 聯絡原廠公司
E09-E30	發光裝置或電子裝置故障或髒污	* 關掉主機清潔之 * 聯絡原廠公司

螢幕顯示	說明	解決方法
E35	最新測量值儲存錯誤,直到整個紀錄被刪除,E35 錯誤碼不會消除	* 不需動作 * 若儲存問題無法解決聯絡原廠公司
HHH	數據超出 22.2mmo/L(400mg/dl)	* 需更換其他範圍機型
No characters on the display 無顯示	* 無電源 * 未使用外接電源,也沒裝電池 * 機體故障	* 檢查之電源供應器和接頭 * 檢查電線 * 更換電池 * 聯絡原廠公司
The display gives erroneous characters 顯示錯誤字母	* 顯示器故障 * 微處理器故障	* 聯絡原廠公司
The display shows " " " " 顯示	* 需換電池 * 假使外接電源,變壓器故障或電路板故障	* 換電池 * 檢查變壓器
The display does not switch from " " and "GLU" to three flashing dashes and " " (ready for easuring) 顯示螢幕無法從 和 GLU 跳到 " _ _ _ "	* 電磁感應器故障 * 試片匣的磁鐵遺失了	* 聯絡原廠公司

螢幕顯示	說明	解決方法
Measurements on control material out of range-either too HIGH or to LOW 控制材料不在範圍內-太高太低	<ol style="list-style-type: none"> 1. 試片過期或不當之儲存 2. 試片匣發光裝置髒污 3. 不在室溫下,控制不良 4. 氣泡於試片內 5. 發光體髒 6. 此不適用紅喜 201+ 血糖機 7. 校正點不正確 8. 控制管不在保存期或不當儲存 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢查保存期限及儲存環境 2. 用新試片重測 3. 確認控制藥水混合均至於室溫內 4. 檢查氣泡 5. 清潔之 6. 僅可使用 Hemocue 專用之控制 7. 聯絡原廠公司 8. 控制器使用期限及標有條件重新測試
Measurements on patient samples are higher or lower than anticipated 測量 sample 不在範圍內過高或過低	<ol style="list-style-type: none"> 1. 試片過期或不當之儲存 2. 發光眼髒 3. 氣泡於試片內 4. 發光裝置髒 5. 校正點不正確,被更改過 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢查保存期限及儲存環境 2. 用新試片重測 3. 是否有氣泡 4. 以清潔棒清潔 5. 聯絡原廠公司

製造廠名稱：Hemocue AB

製造廠地址：Kuvettgatan 1, 26223 ÄNGELHOLM Sweden

藥商名稱：傳永有限公司

藥商地址：台北縣新莊市五權一路 5 號 8 樓之 7