


Sea-Long 非動力式氧氣帳 (頭罩頸圈)

衛署醫器輸壹字第007900號

Sea-Long頸圈配件僅允許同一病患多次使用，氧氣頭罩可多位病患使用。Sea-Long頸圈配件為單一病患使用因此可能需與頭罩分開個別購買，以確保每一位病患均有個人頸圈使用。

使用說明

1. 從塑膠袋中拿出頸圈環或頭罩(塑膠袋可留著備用)
2. 必要的話可清潔滅菌頸圈配件與頭罩，O環已經以Christo-Lube(PN1000)潤滑
3. 修剪頸圈以符合病患頸部尺寸(見以下尺寸教學)
注意：確保頸圈修剪部位平整無鋸齒缺口以減少撕裂狀況，合身的平整切口可協助在必要時候快速移除頸圈。
4. 將頸圈環套在病患頭上並加上標籤加註使用次數：將手放在頸圈下拉住頸圈修剪端往內摺兩公分(見下圖左)，再將剩餘部份往上拉，如此可減少撕裂頸圈的可能性。兩個技術人員必須拉開頸圈開口以符合病患頸部，摺疊頸圈內部可使頸圈停留在病患頸部，調整頸圈環置於病患頸部。注意頸圈下不可以有任何衣服或頭髮壓住或擋住，頸圈必須作到阻絕外界空氣、無皺摺避免空氣進出且須使得病患感到舒適。

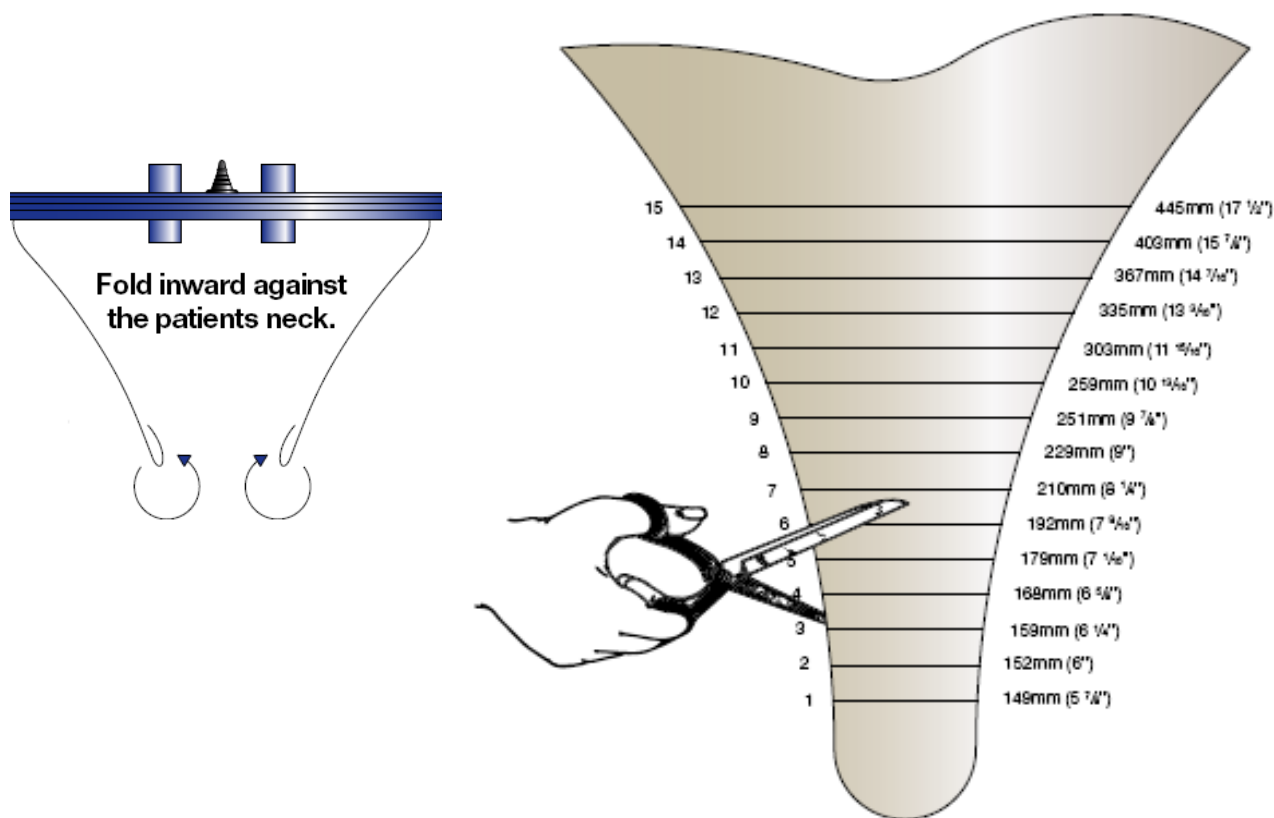

Circumference Dimensions

5. 於艙體中連結頭罩至氧氣傳遞系統：頭罩環上標示處為頭罩正面，頭罩或頸圈直接連結標準22mm波紋管，靠近頭罩環的只能作為出口端。
6. 假使沒有使用到兩個輸出輸入阜，請以22mm蓋子蓋上
7. 讓病人於艙體中就座
8. 加壓至指定壓力
9. 依艙體操作程序打開氧氣供給至頭罩
10. 放置頭罩至病患頭上並連同頸圈至於頭罩環內部
11. 當頭罩充氣，打開排氣閥以建立排出流

尺寸評估說明

請見上頁右圖以協助剪裁適當的頸圈大小

注意：剪裁邊緣必須平滑避免任何鋸齒邊緣以免撕裂頸圈，可按頸圈上的橫紋進行剪裁。


量測病患頸圍並以稍小於病患頸圍的大小剪裁頸圈，可參照下圖之尺寸剪裁位置建議進行裁剪。

清潔說明

頭罩可以氣體滅菌或由醫院殺菌消毒劑進行清潔，必須確認清洗與乾燥完全。頸圈由乳膠製成且僅能提供同一病患使用於各種療程，如果必要可進行清潔。

一般照護、儲存與保養

頸圈O環已稍上過與氧氣相容的非毒性潤滑劑(PN1000)以協助與頸圈配件及頭罩環的密合。當清潔後頸圈環變得不易與頭罩嵌合或不易移除，必須要重新上潤滑劑。檢查頸圈頭罩各部份是否可達應有之功效後，拆解清潔乾燥後進行存放。配件不可置放於頭罩裏，直到下次使用時必須置放於涼溫且乾燥的位置。

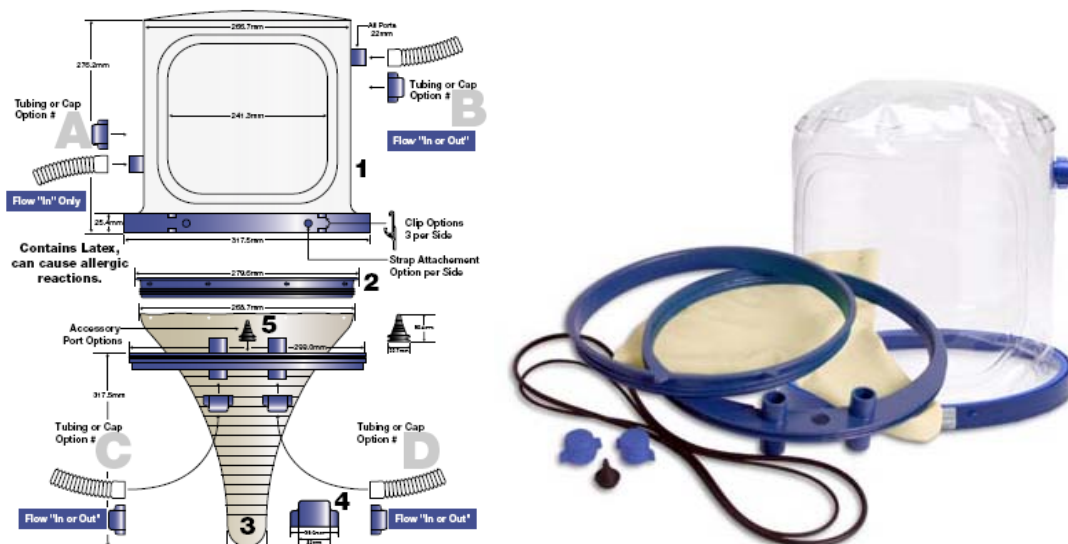

Information contact to

